

Healena™

By GC Aesthetics®

Minimiser vos cicatrices, Maximiser votre satisfaction

Elaboré par un chirurgien plasticien, Healena™ est un pansement adhésif à usage unique composé de 2 couches de silicone et de polyuréthane qui assurent une adhésion uniforme et un effet de contraction et de compression de la cicatrice. Healena™ permet de réduire la visibilité des cicatrices dans le temps, réduire le risque de cicatrices hypertrophiques et chéloïdes et améliorer les résultats esthétiques¹.



Facile à utiliser²



Discret¹



Résiste aux
rayons UV³



Résiste à
l'eau³



A Confident Choice for Life™



FABRIQUÉ EN EUROPE

1. Mode d'emploi de Healena™. 2024.

2. GC Aesthetics®. Données internes. 2024.

3. Determination of moisture vapour transmission and measurement of UV transmission resistance. Test Report, National Metrology and Testing Laboratory. 2023.

Healena™

Minimiser vos cicatrices, Maximiser votre satisfaction

Soins efficaces pour les cicatrices:



Indications:

Healena™ est indiqué pour une cicatrice linéaire, qu'elle soit chirurgicale ou post-traumatique, il peut rester en place pendant un mois ou plus.



Pour le visage

6 semaines à 3 mois d'utilisation



Pour le corps

3 à 6 mois d'utilisation

Instructions d'application:

